

人にも地球にも優しい脱臭シート

ゼオシート



介護サポーターシリーズ

(滑り止め機能付き脱臭シート)

(環境に優しい人工ゼオライト使用)

標準サイズ | 100cm幅 * 80cm長

シートと敷布団の間に敷くだけです

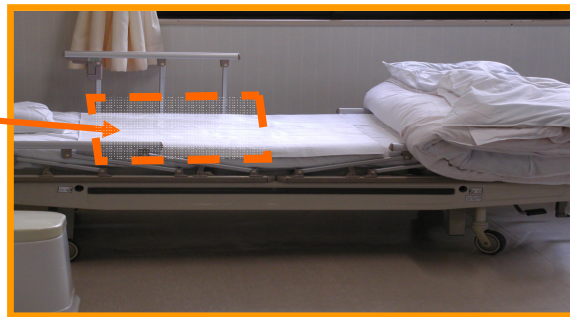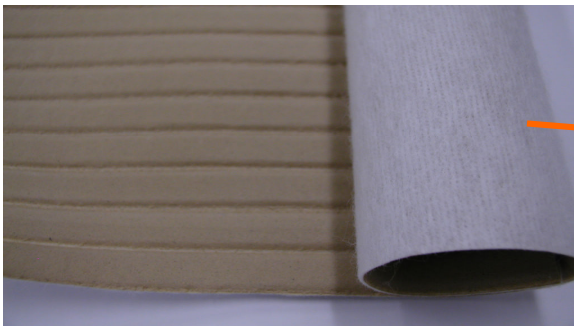

<特徴>


- ① 広範囲な脱臭に便利です。
- ② 裏面は”滑り止め”加工をしています。
- ③ 滑り止め加工部に”脱臭機能”があります。
- ④ 表面の不織布シートは通気性があります。
- ⑤ 汚れは中性洗剤で洗って下さい。(5回程可能)
- ⑥ ソフトタッチでクッション性があります。
- ⑦ 使用後は燃えるゴミとして処分出来ます。

オミケン 株式会社

(使い方)

- ① 敷布団用シーツを上部半分ほど めくってください。
 - ② 『ゼオシーツ』を取り出し 腰から背中あたりに敷いてください。(白が上面)
 - ③ めくったシーツを『ゼオシーツ』の上に掛けて元にもどしてください。
-
- ④ 汚れたら 洗濯が出来ます。
(洗濯ネットに入れて洗ってください。5回程度まで使えます)
 - ⑤ 洗っても効果がなくなったと感じたら 新しいものと交換してください。
 - ⑥ 使用後は燃えるゴミとして処理ください。

(上から見ると)

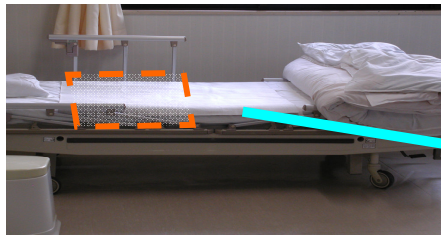

腰から背中あたりに敷く



敷き布団






ゼオシーツ

布シーツ

(使用上の注意)

- ・水に濡れると効果が低下しますので、乾いた状態で使用して下さい。
- ・そのまま洗濯機で洗うと 滑り止め部分がはがれる恐れがあります。
- ・目的以外の用途で使用しないで下さい。

<消臭機能試験>(弊社研究所調べ)

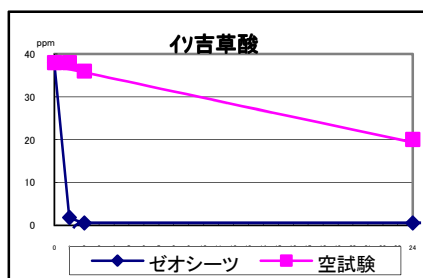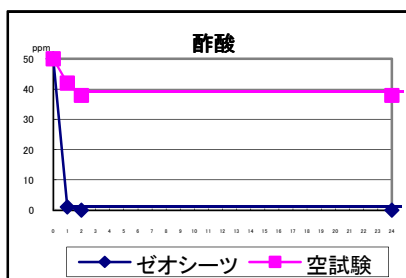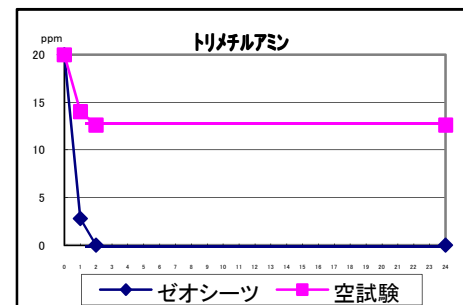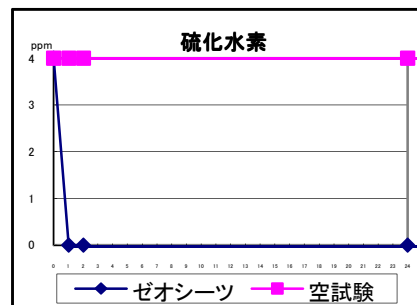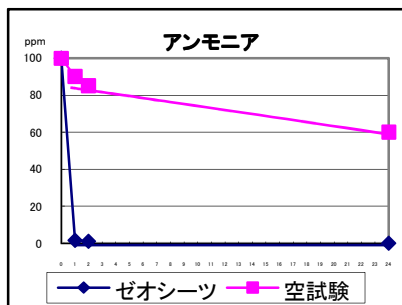

素材

表面材	ポリエステル
裏面材	アクリル樹脂/人工ゼオライト

日本製

(製造) **オーミケンシ** 株式会社
大阪市中央区瓦町2-5-14